



HYALO GYN® Lavanda Vaginale, preparato protettivo della mucosa vaginale, è un prodotto innovativo che rappresenta una evoluzione all'impiego dell'acido ialuronico, il polisaccaride ubiquitariamente presente nei tessuti del corpo umano dove svolge diverse e fondamentali funzioni biologiche. In particolare, grazie alle sue proprietà filmogene e protettive, favorisce il processo della rigenerazione cellulare.

L'integrità del tessuto epiteliale costituente la mucosa vaginale e vulvare è di fondamentale importanza per assicurare la naturale funzione protettiva che esso svolge nei confronti delle aggressioni da agenti patogeni (microrganismi e sostanze tossiche) responsabili di compromettere ed aggravare l'evoluzione della lesione stessa, rappresentano un potenziale rischio, anche grave, per tutto l'organismo.

L'aspetto innovativo della composizione di **HYALO GYN® Lavanda Vaginale** è l'impiego di acido ialuronico a basso peso molecolare e bassa viscosità; grazie a queste peculiari proprietà l'attività protettiva nei confronti dei processi di riepitelizzazione cutanea del polimero viene esaltata.

HYALO GYN® Lavanda Vaginale non ha controindicazioni specifiche.

Composizione

Componente principale: acido ialuronico sale sodico 0,2%

Altri componenti: acqua, acido etilendiaminotetracetico sale disodico, polivinilpirrolidone, fenossietanolo, acido benzoico, acido deidroacetico, etilesilglicerina, idrossido di sodio, acido lattico, fragranza gelsomino, olio di ricino idrogenato.

Indicazioni

HYALO GYN® Lavanda Vaginale, protettivo della mucosa vaginale è indicato sia a scopo preventivo per conservare l'integrità della mucosa vaginale e vulvare, sia come protettivo in grado di favorire il processo di riparazione delle lesioni delle mucose, quale sia la causa responsabile: rapporti sessuali, uso di contraccettivi, esami ginecologici invasivi. In menopausa l'uso del preparato è utile per contrastare le sensazioni di fastidio derivanti dalla carenza degli estrogeni (prurito, bruciore, secchezza, senescenza delle mucose).

Istruzioni per l'uso

Una irrigazione al giorno o ogni due giorni, a seconda della gravità dell'affezione, in presenza di infiammazione ed irritazione della mucosa vaginale.

Lavare le mani in modo adeguato prima dell'applicazione.

Rompere la capsula del flacone.

Estrarre la cannula dalla sua confezione.

Applicare la cannula monouso sul flacone.

Introdurre la cannula nella vagina e premere delicatamente il flacone.

Lasciar defluire gradualmente tutta la soluzione all'interno della vagina.

Estrarre la cannula e gettarla nel contenitore dei rifiuti.

Dopo aver terminato asciugarsi.

Avvertenze

Monouso. Utilizzare l'intero contenuto del flaconcino per ogni singola applicazione.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

La funzionalità del prodotto è offerta dall'integrità della confezione primaria.

Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi o di ipersensibilità al prodotto, consultando il proprio medico qualora i sintomi persistessero.

In caso di riutilizzo può essere veicolo di infezioni.

Non disperdere i contenitori vuoti nell'ambiente.

Conservazione

Conservare a una temperatura compresa fra 5°C e 40°C

Conservare l'astuccio e/o il foglietto illustrativo per le avvertenze e le modalità d'uso.

Confezione

Contiene 3 flaconi da 30 ml e 3 cannule.

Data dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso: Febbraio 2018

 **Biofarmitalia S.r.l.**
Strada Rivoltana km 6/7
20090 Rodano (MI) Italia

 0546

Distributore esclusivo:

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (PD) Italia



03DM38925 AW 430
Rev.C



Monouso




Utilizzare
entro la data



Numero
di lotto



Leggere
attentamente
le istruzioni
per l'uso

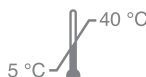

Limiti di
temperatura



Fabbricante



Eliminare
correttamente