



HYALO GYN®

idratante vaginale in gel con Hydeal-D® 0,2%

formulazione senza parabeni

Informazioni sul prodotto

L'epitelio vaginale è morbido ed elastico grazie ad un delicato equilibrio che mantiene il giusto livello di idratazione e lubrificazione.

In alcune fasi della vita della donna (es. dopo il parto, durante l'allattamento, in menopausa), a seguito di alcuni trattamenti farmacologici o patologie che possono determinare secchezza vaginale o in periodi di particolare stress questo delicato equilibrio viene alterato, inducendo uno stato di sofferenza, caratterizzato da secchezza vaginale, bruciore ed irritazione.

Il bruciore e l'irritazione, spesso associati a microlesioni dell'epitelio, sono causati dall'attrito provocato dalla mancata lubrificazione.

In questi casi, è utile l'utilizzo locale di un prodotto in grado di favorire l'idratazione della mucosa contribuendo a restituirle la naturale elasticità e morbidezza.

HYALO GYN® è un gel incolore con elevate proprietà idratanti che contiene Hydeal-D®, un derivato dell'acido ialuronico, che ne permette un prolungato rilascio sulla sede di applicazione.

L'acido ialuronico è una molecola responsabile del mantenimento del corretto livello di idratazione dei tessuti, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito dei processi di riparazione.

La formulazione a base di Hydeal-D® offre una ottimale adesione alla mucosa vaginale, una prolungata azione idratante e favorisce i processi di guarigione delle microlesioni.

Composizione

Componente principale: Hydeal-D® 0.2% (derivato a lento rilascio di acido ialuronico)

Altri componenti: propilene glicole, metilpropanediolo, carbomer, 1,2-Esandiolo, Caprilil glicole, sodio idrossido, acqua depurata.


La formulazione non contiene nè parabeni nè conservanti.

Indicazioni

Gel complementare al trattamento della secchezza vaginale di varia natura; coadiuvante del processo di guarigione delle microlesioni da attrito della mucosa vaginale.

Modalità d'uso

1. Avvitare saldamente l'applicatore all'imboccatura del tubo.
2. Spremere il tubo e riempire l'applicatore fino a quando il pistoncino non si ferma.
3. Svitare l'applicatore dal tubo. È consigliabile far fuoriuscire una piccola quantità di gel dalla cannula in modo che questa sia lubrificata prima della sua introduzione.
4. Dopo aver lavato le mani e provveduto ad un'adeguata igiene intima, inserire l'applicatore nella cavità vaginale assumendo una posizione seduta o distesa sulla schiena e spingere lo stantuffo fino a provocare la fuoriuscita di tutto il gel.
5. Estrarre l'applicatore. Gli applicatori sono monouso e devono essere eliminati dopo l'utilizzo.

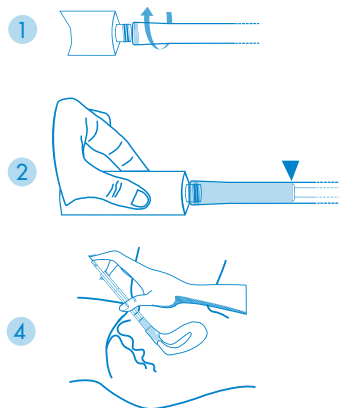

Frequenza di applicazione

La frequenza di applicazione dipende dalle condizioni di secchezza della mucosa vaginale. Si raccomanda una applicazione ogni tre giorni per un periodo di trenta giorni, salvo diverso parere del medico. Non è necessario interrompere il trattamento durante il flusso mestruale.

Controindicazioni

Ipersensibilità individuale accertata al prodotto.

Precauzioni ed avvertenze

In caso di infezione vaginale l'uso del prodotto è a discrezione del Medico.

In pazienti con particolare sensibilità individuale verso qualche componente della formulazione e/o all'inizio del trattamento, possono verificarsi sensazioni di calore o bruciore vaginali transitori. In caso di bruciore persistente, si consiglia di interrompere il trattamento e di consultare il proprio Medico.

Il prodotto non influenza eventuali indagini ginecologiche.

Il prodotto può essere usato con i profilattici in lattice lubrificati, non lubrificati e in poliisoprene.

Il prodotto non può essere usato con i profilattici in poliuretano.

Non usare contemporaneamente a prodotti a base di Sali di ammonio quaternario, come benzalconio cloruro, che possono alterare l'acido ialuronico.

Gli applicatori sono monouso e devono essere gettati dopo l'uso. Se vengono riutilizzati, Fidia Farmaceutici non può rispondere delle prestazioni, la funzionalità o la pulizia.

Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata in modo tale da compromettere l'integrità del tubo.

Non disperdere i contenitori vuoti nell'ambiente.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere fuori della vista e dalla portata dei bambini.

Effetti Indesiderati

Durante l'uso di prodotti per il trattamento della secchezza vaginale possono presentarsi perdite biancastre e inodori.

Conservazione

Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

Non congelare.

Confezione

Astuccio contenente un tubo da 30g di gel e una busta sigillata con 10 applicatori monouso.

Fabbricante

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A

35031 Abano Terme (PD) – ITALY



Data dell'ultima revisione delle istruzioni per l'uso: Settembre 2017



Consultare le
istruzioni
per l'uso



Utilizzare
entro



Codice
di lotto



Non utilizzare se
la confezione
è danneggiata



Limiti di
temperatura



Fabbricante



Non riutilizzare